



Access® Edge

Packung 15 x 0,66 g Kapsel, 30 Kanülen



Artikelnr.: 102724
Hersteller: Centrix Incorporated
Gewicht: 0.109 kg
Höhe: 163 mm
Breite: 83 mm
Länge: 115 mm

€ 110,78

Zzgl. MwSt.

Packung 15 x 0,66 g Kapsel, 30 Kanülen

Access® Edge retrahiert sanft das Gewebe und kontrolliert gleichzeitig Blutungen und das Aussickern von Flüssigkeiten.

Zur Verwendung von *Access Edge* setzen Sie den Einheitsdosis-Aufsatz auf eine Centrix C-R-Spritze und injizieren das Material langsam in und um den gingivalen Sulkus. Zusätzlich kann GingiCap von Centrix verwendet werden, um die Paste in den gingivalen Sulkus zu pressen. Während *Access Edge* trocknet, retrahiert das Gewebe und gibt die gesamten Ränder des Restaurationsbereichs frei. Nach der Anwendung muss *Access Edge* gründlich ausgespült werden und der Sulkus an der Luft trocknen, so dass der Präparationsbereich „offen“ und sauber ist.