



# Calciumhydroxid-hochdispers

Packung 15 g Paste



Artikelnr.: 14372

Hersteller: Humanchemie GmbH

Gewicht: 0.042 kg

Höhe: 58 mm

Breite: 32 mm

Länge: 33 mm

**€ 16,80**

Zzgl. MwSt.

## Packung 15 g Paste

- Reine Calciumhydroxidpaste
- Hochaktiv, mit optimalem pH > 12,4
- Behält seine volle Wirkung auch bei häufigem Öffnen des Fläschchens
- Sofort einsatzbereit
- Gegenüber nichtmetallischem Material durch Membranbildung gewebeschonend

## Indikation / Zweckbestimmung:

- Zur direkten Pulpenüberkappung.
- Zur Wurzelbehandlung mit oder ohne Depotphorese<sup>®</sup>, auch von Milchzähnen Auch als temporäre Zwischeneinlage
- Zur Herstellung einer Calciumhydroxid-Milch zum Spülen von Wurzelkanälen

## Anwendung:

Die Applikation muss zur Erzielung der gewünschten Eigenschaften (Neutralisation, Desinfektion) immer im feuchten Zustand erfolgen, wonach oberflächlich mit dem Warmluftbläser angetrocknet werden kann.

## Pulpenüberkappung:

Die Paste wird in dünner Schicht auf den Kavitätenboden aufgebracht. Danach kann mit dem Warmluftbläser oberflächlich angetrocknet werden. Darüber legt man drucklos eine Unterfüllung

## Zwischeneinlage bei der Wurzelbehandlung mit und ohne Depotphorese<sup>®</sup>:

Calciumhydroxid-hochdispers wird mit dem Lentulo in den Wurzelkanal eingebracht. Für die Depotphorese<sup>®</sup> sollte Calciumhydroxid-hochdispers mit Aqua dest. auf eine sahnige Konsistenz gebracht werden.

Spülungen mit Calciumhydroxid-Milch:

Eine Calciumhydroxid-Milch kann durch Aufschütteln von etwa 20 % Paste in Aqua dest. (Ph. Eur.; pharm. Güte) hergestellt werden.