



Eloxal-Reiniger

Dose 300 ml



Artikelnr.: 30991
Hersteller: B.Braun SE
Gewicht: 0.357 kg
Höhe: 266 mm
Breite: 128 mm
Länge: 135 mm

€ 9,67

Zzgl. MwSt.

Eloxal-Reiniger
Eloxal Cleaner
Detergent p. surfaces
Detergente p. superficie

AESCLAP STERILCONTAINER

Gebrauchsanweisung

1. Vor Gebrauch kräftig schütteln.
2. Mit trockenem Lappen auftragen und kurz einwirken lassen.
3. Danach unter fließendem Wasser abspülen.

Instructions for use

1. Shake vigorously before use.
2. Put on with a dry cloth and let it work in for a short time.
3. Then rinse under flowing water.

Mode d'emploi

1. Agiter bien avant l'emploi.
2. Appliquer avec un chiffon sec et faire agir brièvement.
3. Après rincer sous l'eau courante.

Instrucciones de uso

1. Antes del empleo hay que agitar fuerte.
2. Se aplica con un trapo seco y se hace actuar de corte duración.
3. Después se lava con agua corriente.

Istruzioni d'uso

1. Agitare energicamente prima dell'uso.
2. Detergere con un panno asciutto e fare assorbire brevemente.
3. Quindi sciacquare sotto acqua corrente.

AESCLAP

AESCLAP AG
Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen/Germany
Phone +49 (07461) 95-0
Fax +49 (07461) 95-2600

BRAUN

Best.-Nr./Cat. No./Réf. No./Referencia/Código
300 g

JG 601
TA 005 300

Dose 300 ml

Eloxal-Reiniger, zur Reinigung und Pflege von Containeroberflächen.