

TEETHMATE™ DESENSITIZER - ANWENDUNGSTIPPS

DIE LÖSUNG FÜR SENSIBLE ZÄHNE

TEETHMATE™ DESENSITIZER ist der erste Desensitizer, der eine dauerhafte Lösung für sensible Zähne bietet.

Kuraray Noritake Dental hat TEETHMATE™ DESENSITIZER so entwickelt, dass es das härteste Mineral im Körper, Hydroxylapatit (HAP) bildet. Es entsteht genau dort, wo es benötigt wird und schließt Dentintubuli sowie Schmelzrisse. Aufgrund seiner Natürlichkeit ist es auch gewebefreundlich.




DIE ANWENDUNG SCHRITT FÜR SCHRITT

Reinigen Sie die Zähne, die Überempfindlichkeiten aufzeigen. Danach entnehmen Sie als erstes die Flüssigkeit des Materials. Halten Sie die Flasche dazu **vertikal** und applizieren Sie die nötige Menge in das Mischtablett. Nun schütteln Sie das Fläschchen mit dem Pulver. Danach bestimmen Sie die richtige Menge und fügen diese der Flüssigkeit bei. Jetzt beide Komponenten für mindestens 15 Sekunden mischen bis eine **cremige Paste** entsteht.

1. Reinigen Sie die Zähne, die Überempfindlichkeiten aufzeigen und **mischen** Sie das Pulver für mindestens 15 Sekunden in die Flüssigkeit ein.

2. Massieren Sie die angemischten Paste für mindestens 30 Sekunden auf den Zähnen ein.

3. Spülen Sie die überschüssige Paste mit Wasserspray oder lassen Sie den Patienten ausspülen.

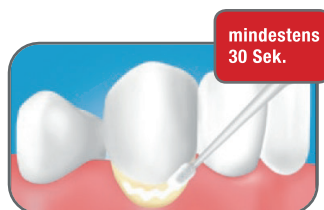

Der Patient sollte nach der Behandlung 45 Minuten nicht essen und trinken.
Eine optimale Wirkung tritt ca. 24 Stunden nach der Anwendung ein.

Bereich	Flüssigkeit	Puder
1 Zahn	1 Tropfen	1 Messlöffel (kleiner Messlöffel)
2 oder 3 Zähne	2 Tropfen	1 Messlöffel (großer Messlöffel)

TIPPS & TRICKS

Nehmen Sie immer zuerst die Flüssigkeit und dann erst das Pulver für den Mischvorgang. Sonst entsteht keine cremige Paste, sondern lediglich eine bröselige Konsistenz. Letzteres führt zu keinem optimalen Ergebnis für den Patienten.

Bei der Anwendung auf vorbehandeltem Dentin für Füllungen und prothetische Restaurationen das behandelte Dentin nach Schritt 3 säubern. Danach die Füllung oder prothetische Restauration vornehmen.

Wenn ein Bonding oder Zement verwendet wird, die ein vorheriges Ätzen verlangen, sollte dies **vor der Anwendung** von TEETHMATE™ DESENSITIZER durchgeführt werden.

Eine optimale Wirkung tritt ca. 24 Stunden nach der Anwendung ein.

Ihr Patient sollte die ersten 45 Minuten nach der Behandlung nicht essen und trinken.