


# SONICflex™

## Livre des inserts


Aperçu des inserts KaVo SONICflex




**KAVO**

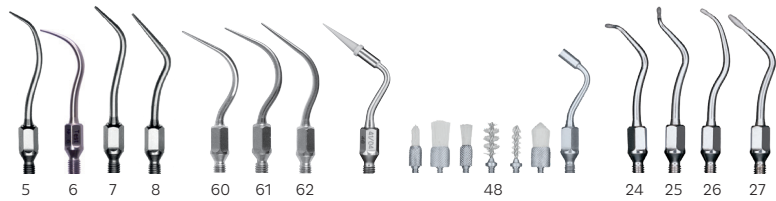


scaler | paro | implant | clean | root planer

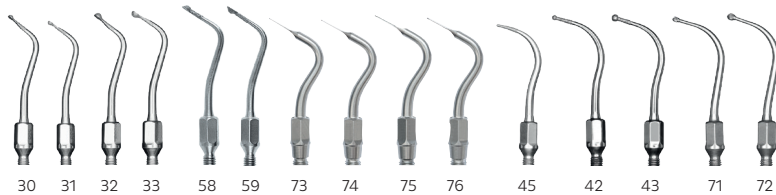


micro | bevel | stripping, shaping | seal | caries

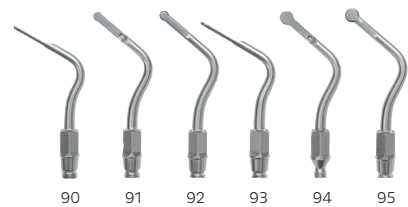

crown extension

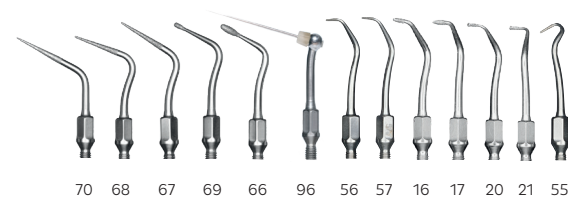

endo | retro

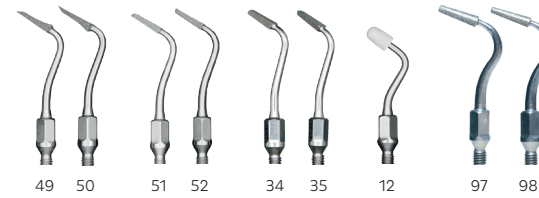

gold | ceram | CAD/CAM | CEM | crown

## SONICflex - À la pointe de la polyvalence.

Grâce aux indications variées dont vous disposez avec le SONICflex, il deviendra rapidement l'un de vos instruments le plus utilisé. Ses nombreux inserts lui permettent de s'adapter exactement à vos besoins.

### Options variées - vos atouts et avantages :

- Davantage d'inserts et ainsi de possibilités d'utilisation que tous les autres détarteurs
- Plus de 50 inserts différents
- Pour tous les domaines d'application
- La base d'un traitement invasif minimal réussi



# Aperçu des instruments SONICflex™.



**MASTER**  
series

**EXPERT**  
series

**SMART**  
series

Avec votre KaVo SONICflex, vous disposez du détartreur le plus puissant et le plus silencieux de sa catégorie. Il est sans aucun doute l'instrument ayant la plus large gamme d'indications.

Il sera votre allié fiable, puissant et précis grâce à ses 3 niveaux de puissance réglables en fonction des applications et des inserts utilisés.

## Technique supérieure – Vos atouts et avantages :

- Puissance réglable sur trois niveaux – conditions de travail optimisées à chaque utilisation
- Sensiblement plus silencieux que ses concurrents directs (jusqu'à 15 dB) – moins de stress et de nuisances sonores pour l'équipe du cabinet et les patients
- Aucun accessoire supplémentaire n'est nécessaire ; il suffit de le brancher sur le raccord KaVo MULTIflex ou Sirona
- Meilleure éclairage : 25 000 Lux, pour une vision détendue sans fatigue des yeux
- Qualité KaVo éprouvée – le SONICflex 2008 L représente la troisième génération de détartreurs chez KaVo, issue de 25 années d'expérience et de connaissances

# PROPHYLAXIE

## Insert SONICflex scaler n° 5

Traitement : pour éliminer le tartre sur de grandes surfaces  
Forme : Universel



N° de référence : Insert scaler n° 5  
Insert scaler n° 5A



0.571.5171  
1.005.8949

## Insert SONICflex scaler n° 6 / 6A

Traitement : pour éliminer le tartre supra-gingival sur de grandes surfaces  
Forme : Faucille



N° de référence : Insert scaler n° 6  
Insert scaler n° 6A




0.571.5181  
1.005.8950

## Insert SONICflex scaler n° 7 / 7A

Traitement : pour éliminer le tartre supra-gingival sur de grandes surfaces  
Forme : Paro



N° de référence : Insert scaler n° 7  
Insert scaler n° 7A

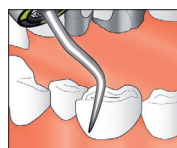

0.571.5191  
1.005.8951

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex scaler n° 8 / 8A

Traitement : pour éliminer le tartre supra- et sous-gingival  
Forme : paro, extra long




N° de référence : Insert scaler n° 8  
Insert scaler n° 8A



0.571.5371  
1.006.1953

## Insert SONICflex clean n° 48/ 48A

Traitement : élimination des plaques, nettoyage des fissures, nettoyage des cavités et des moignons  
pour couronnes  
Forme : différents embouts, balais à usage unique

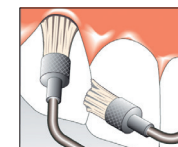



|                   |                      |            |
|-------------------|----------------------|------------|
| N° de référence : | Insert scaler n° 48  | 0.571.0401 |
|                   | Insert scaler n° 48A | 1.006.1982 |
|                   | Clean brush n° 1     | 0.571.0402 |
|                   | Clean brush n° 2     | 0.571.0412 |
|                   | Clean brush n° 3     | 0.571.0422 |
|                   | Clean brush n° 4     | 0.571.0432 |
|                   | Clean brush n° 5     | 0.571.0472 |
|                   | Clean brush n° 6     | 0.571.0482 |
|                   | Brush set            | 0.571.0001 |
|                   | Brush set A          | 1.006.2026 |

# PARODONTOLOGIE

## Insert SONICflex paro n° 60 / 60A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; Pour les incisives, les surfaces lisses

Forme : insert long et droit - surface arrondie

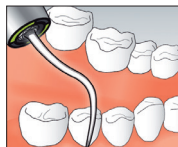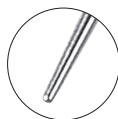

N° de référence : Insert paro n° 60  
Insert paro n° 60A

0.571.7402  
1.006.1934

## Insert SONICflex paro n° 61 /61A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires

Forme : insert coudé, **gauche** - surface arrondie



N° de référence : Insert paro n° 61  
Insert paro n° 61A

0.571.7412  
1.006.1935

## Insert SONICflex paro n° 62 /62A

Traitement : nettoyage soigneux des poches en parodontologie ; nettoyage efficace des poches jusqu'à une profondeur de 9 mm ; pour prémolaires, molaires

Forme : insert coudé, **droite** -surface arrondie



N° de référence : Insert paro n° 62  
Insert paro n° 62A

0.571.7422  
1.006.1936

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:



XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)

XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex implant

Traitement : retrait efficace de dépôts et concrétions sous-gingivales en cas d'implants

Forme : inserts cunéiformes, partie en plastique à usage unique (PEEK)

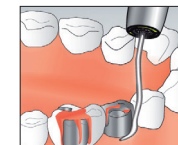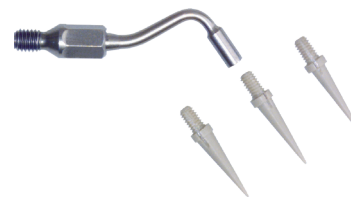

N° de référence : Implant set  
Implant set A  
Implant refill (30 pcs)

1.003.8167  
1.006.2027  
1.003.8168

# PARODONTOLOGIE

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex rootplaner n° 24 / 24A

Traitement : pour furcations difficilement accessibles, permet également l'accès aux entrées proximales des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée

Forme : bouton à contre-angle, petit, **gauche**, diamantation D25



N° de référence : Insert rootplaner n° 24  
Insert rootplaner n° 24A

0.571.5621  
1.006.1957

## Insert SONICflex rootplaner n° 25 / 25A

Traitement : pour furcations difficilement accessibles, permet également l'accès aux entrées proximales des furcations dans le cas où la rangée dentaire est fermée

Forme : bouton à contre-angle, petit, **droite**, diamantation D25



N° de référence : Insert rootplaner n° 25  
Insert rootplaner n° 25A

0.571.5631  
1.006.1959

## Insert SONICflex rootplaner n° 26 / 26A

Traitement : nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités

Forme : universel, bouton, **petit** ; diamantation D25




N° de référence : Insert rootplaner n° 26  
Insert rootplaner n° 26A

0.571.5641  
1.006.1961

## Insert SONICflex rootplaner n° 27 / 27A

Traitement : nettoyage efficace de surfaces lisses et de concavités

Forme : paro extra long, bouton, **grand** ; diamantation D25

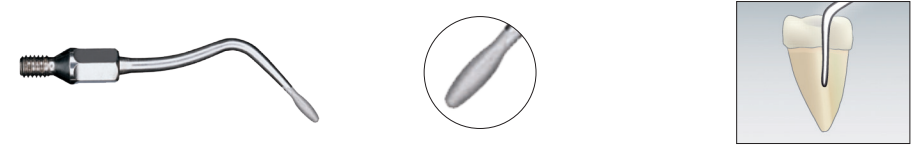

N° de référence : Insert rootplaner n° 27  
Insert rootplaner n° 27A

0.571.5651  
1.006.1963


# INVASIF AU MINIMUM

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex micro n° 30 / 30A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries  
Forme : petite demi-sphère, **mésiale**, diamantation D46

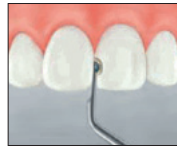


N° de référence : Insert micro n° 30 / 30A  
Insert micro n° 30 / 30A

0.571.6811  
1.006.1969

## Insert SONICflex micro n° 33 / 33A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries  
Forme : grande demi-sphère, **distale**, diamantation D46

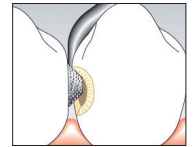


N° de référence : Insert micro n° 33  
Insert micro n° 33A

0.571.6821  
1.006.1975

## Insert SONICflex micro n° 31 / 31A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries  
Forme : petite demi-sphère, **distale**, diamantation D46

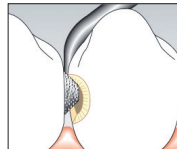


N° de référence : Insert micro n° 31  
Insert micro n° 31A

0.571.6801  
1.006.1971

## Insert SONICflex bevel n° 58 / 58A

Traitement : les bords proximaux des cavités sont coupés en biais  
Forme : **mésiale**, diamantation D46

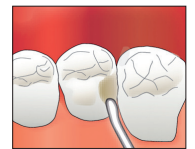


N° de référence : Insert bevel no. 58  
Insert bevel no. 58A

0.571.7392  
1.006.1988

## Insert SONICflex micro n° 32 / 32A

Traitement : thérapie peu invasive en début de caries  
Forme : grande demi-sphère, **mésiale**, diamantation D46

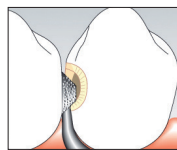

N° de référence : Insert micro n° 32  
Insert micro n° 32A

0.571.6831  
1.006.1973

## Insert SONICflex bevel n° 59 / 59A

Traitement : les bords proximaux des cavités sont coupés en biais  
Forme : **distale**, diamantation D46



N° de référence : Insert bevel no. 59  
Insert bevel no. 59A

0.571.7382  
1.006.1990


# INVASIF AU MINIMUM

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex seal conical n° 45/ 45A

Traitement : préparation invasive minimale des puits et fissures  
Forme : conique, insert droit Ø 0,5 mm, diamantation D46

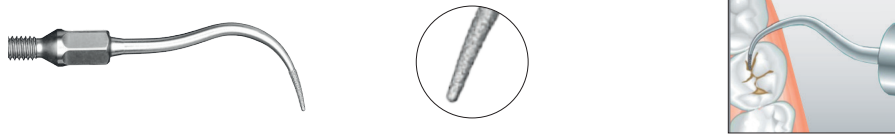

N° de référence : Insert seal n° 45  
Insert seal n° 45A

1.000.8323  
1.007.1506

## Insert SONICflex cariex 1.0 no. 71/ 71A

Traitement : élimination par couches de la partie principale de la substance cariée  
Forme : forme sphérique, Ø 1,0 mm, métal dur




N° de référence : Insert cariex TC n° 71 / 71A  
Insert cariex TC n° 71 / 71A

1.000.7362  
1.006.2002

## Insert SONICflex cariex 0.8 n° 42/ 42A

Traitement : fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive  
Forme : forme sphérique, Ø 0,8 mm, diamantation D64

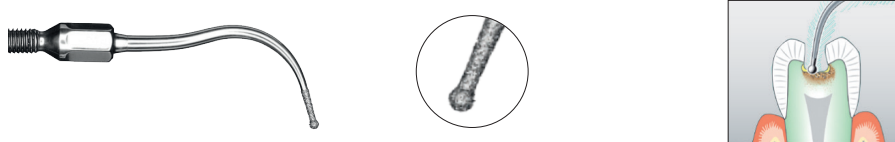

N° de référence : Insert cariex D n° 42  
Insert cariex D n° 42A

1.000.7105  
1.006.1980

## Insert SONICflex cariex 1.4 n° 72/ 72A

Traitement : élimination par couches de la partie principale de la substance cariée  
Forme : forme sphérique, Ø 1,4 mm, métal dur




N° de référence : Insert cariex TC n° 72  
Insert cariex TC n° 72A

1.000.7363  
1.006.2004

## Insert SONICflex cariex1.2 n° 43/43 A

Traitement : fine excavation de caries conservatrice pour la substance et sonoabrasive  
Forme : forme sphérique, Ø 1,2 mm, diamantation D64

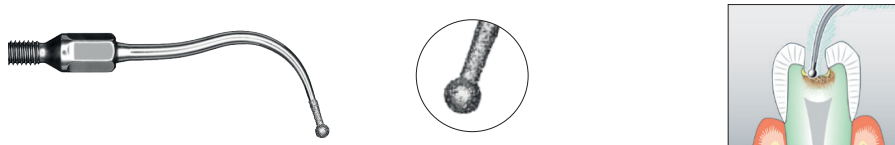

N° de référence : Insert cariex D n° 43  
Insert cariex D n° 43A

1.000.7167  
1.006.1981



# PROTHÈSE DENTAIRE


Informations importantes concernant  
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex prep gold n° 49 / 49A mésial

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale après préparation préalable avec un instrument rotatif et ce, pour améliorer la technique de restauration

Forme : **mésiale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60° cervical - 30°, diamantation D46

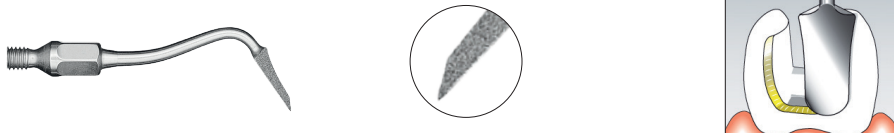


N° de référence : Insert prep gold n° 49  
Insert prep gold n° 49A

0.571.7212  
1.006.1983

## Insert SONICflex prep ceram n° 52 / 52A

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale, transitions harmonieuses des zones marginales cervicales et latérales

Forme : **distale**, inserts avec angles de coupe définis, latéral - 60°, cervical - 75°, diamantation D46

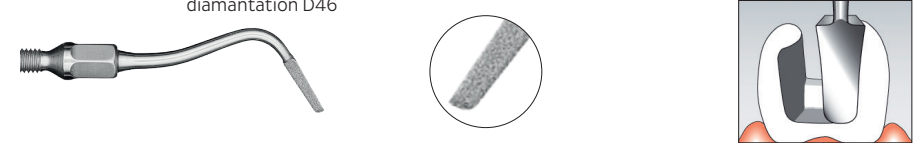


N° de référence : Insert prep ceram n° 52  
Insert prep ceram n° 52A

0.571.7272  
1.006.1986

## Insert SONICflex prep gold n° 50 / 50A distal

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale après préparation préalable avec un instrument rotatif et ce, pour améliorer la technique de restauration

Forme : **distale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60°, cervical - 30°, diamantation D46

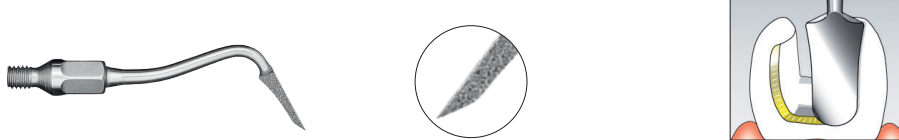


N° de référence : Insert prep gold n° 50  
Insert prep gold n° 50A

0.571.7222  
1.006.1984

## Insert SONICflex prep ceram n° 51 / 51A

Traitement : préparation précise de différents angles de coupe dans la zone marginale, transitions harmonieuses des zones marginales cervicales et latérales

Forme : **mésiale**, inserts avec angles de coupe définis : latéral - 60°, cervical - 75°, diamantation D46

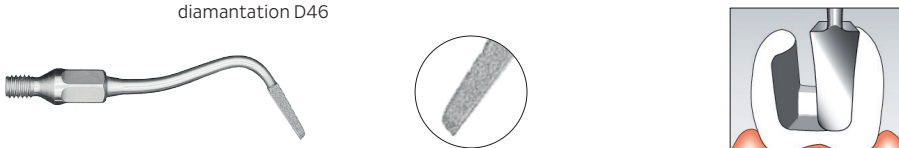

N° de référence : Insert prep ceram n° 51  
Insert prep ceram n° 51A


0.571.7262  
1.006.1985

# PROTHÈSE DENTAIRE

## Insert SONICflex prep CAO/FAO n° 34 / 34A

Traitement : accord parfait de la préparation des cavités sur les processus de travail techniques dans les systèmes CAO-FAO

Forme : **mésiale**, angle latéral de 30°, angle cervical de 90°, diamantation D46

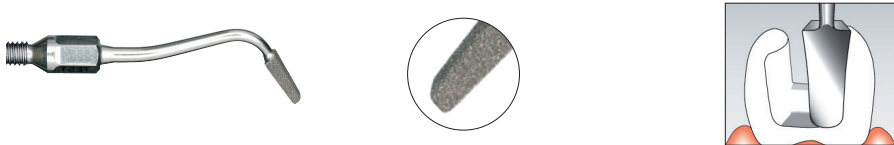


N° de référence : Insert prep CAO/FAO n° 34  
Insert prep CAO/FAO n° 34A

1.002.1984  
1.006.1977

## Insert SONICflex prep CAO/FAO n° 35 / 35A

Traitement : accord parfait de la préparation des cavités sur les processus de travail techniques dans les systèmes CAO-FAO

Forme : **distale**, angle latéral de 30°, angle cervical de 90°, diamantation D46

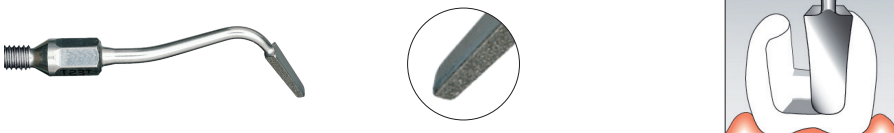

N° de référence : Insert prep CAO/FAO n° 35  
Insert prep CAO/FAO n° 35A

1.002.1986  
1.006.1979

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex stripping n° 73 / 73A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire  
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire  
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite  
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : plat, mésial, diamanté, (D25)



N° de référence : Insert stripping n° 73  
Insert stripping n° 73A

1.011.2993  
1.011.2994

## Insert SONICflex stripping n° 74 / 74A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire  
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation, proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire  
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite  
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : plat, distale, diamanté, (D25)



N° de référence : Insert stripping n° 74  
Insert stripping n° 74A

1.011.2995  
1.011.2996

# PROTHÈSE DENTAIRE


## Insert SONICflex shaping n° 75 / 75A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire  
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire  
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite  
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : convexe, mésial, diamanté, (D 25)



N° de référence : Insert shaping n° 75  
Insert shaping n° 75A

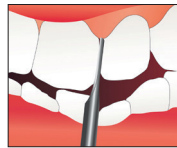

1.011.2997  
1.011.2998

## Insert SONICflex shaping n° 76 / 76A

Traitement : Séparation avant le début de la préparation coronaire  
Arrondissement des zones de transition sur la limite de préparation proximale dans le cadre d'une préparation cavitaire  
Modification anatomique des surfaces proximales des obturations en composite  
Réduction proximale de l'émail dans le cadre de l'orthopédie dentofaciale

Forme : convexe, distale, diamanté, (D 25)



N° de référence : Insert shaping n° 76  
Insert shaping n° 76A



1.011.2999  
1.011.3000

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:


XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex cem n° 12 / 12A

Traitement : Insert cem n° 12 con embout cem  
Forme : bouchon arrondi en plastique



N° de référence : Insert cem n° 12 avec Embout cem  
Insert cem n° 12A avec Embout cem  
Embout Cem

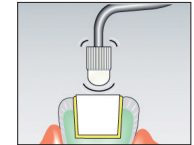

0.571.5431  
1.006.2021  
0.571.7142


## Insert SONICflex prep crown n° 97 / 97A

Traitement : préparation corono-périphérique (moignons)- l'idéal pour cette indication est la combinaison d'instruments de préparation rotatifs pour couronnes et d'inserts sonores

Forme : arrondie, diamantation D46



N° de référence : Insert crown prep n° 97  
Insert crown prep n° 97A

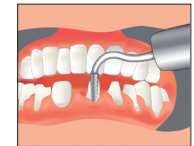

1.008.6383  
1.008.6384


## Insert SONICflex prep crown n° 98 / 98A

Traitement : préparation corono-périphérique (moignons) - l'idéal pour cette indication est la combinaison d'instruments de préparation rotatifs pour couronnes et d'inserts sonores.

Forme : plat, diamantation D46



N° de référence : Insert crown prep n° 98  
Insert crown prep n° 98A

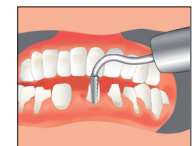

1.008.6385  
1.008.6386

# RÉSECTION APICALE


Informations importantes concernant  
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex retro n° 56 / 56A

Traitement : Recherche du canal radiculaire. Travail considérablement facilité en ce qui concerne la préparation rétrograde réelle des cavités

Forme : insert cylindrique extrêmement étroit, **gauche**, diamantation D46

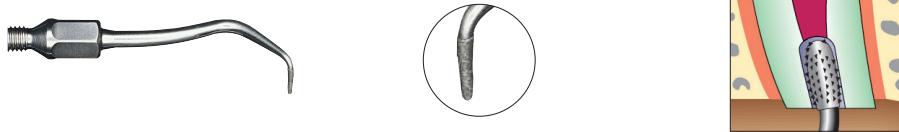

N° de référence : Insert retro n° 56  
Insert retro n° 56A

0.571.7322  
1.006.2040

## Insert SONICflex retro n° 57 / 57A

Traitement : Recherche du canal radiculaire. Travail considérablement facilité en ce qui concerne la préparation rétrograde réelle des cavités

Forme : insert cylindrique extrêmement étroit, **droite**, diamantation D46



N° de référence : Insert retro n° 57  
Insert retro n° 57A

0.571.7332  
1.006.2041

## Insert SONICflex retro n° 16 / 16A

Traitement : préparation du canal radiculaire, accès considérablement facilité en cas de forte courbure articulaire

Forme : **gauche**, petit cylindre, diamanté D64



N° de référence : Insert retro n° 16  
Insert retro n° 16A

0.571.5541  
1.006.2036

## Insert SONICflex retro n° 17 / 17A

Traitement : préparation du canal radiculaire, accès considérablement facilité en cas de forte courbure articulaire

Forme : **droite**, petit cylindre, diamantation D64



N° de référence : Insert retro n° 17  
Insert retro n° 17A

0.571.5581  
1.006.2035

## Insert SONICflex retro n° 20 / 20A et n° 21 / 21A

Traitement : Préparation de l'incision inférieure. Préparation, adaptée aux axes, du canal radiculaire en cas de défaut minimal des os en forme de poire, **petit, gauche**, diamantation D64



N° de référence : Insert retro n° 20  
Insert retro n° 20A

0.571.5521  
1.006.2037

N° de référence : en forme de poire, **petit, droite**, diamantation D64



N° de référence : Insert retro n° 21  
Insert retro n° 21A

0.571.5561  
1.006.2038

## Insert SONICflex retro n° 55 / 55A

Traitement : pour les racines dont les pointes sont fortement inclinées vers l'oral

Forme : diamantation D46



N° de référence : Insert retro n° 55  
Insert retro n° 55A

0.571.7342  
1.006.2039

# ENDODONTIE

## Insert SONICflex endo n° 66 / 66A

Traitement : Mise en oeuvre de la cavité d'accès, élimination d'excédents  
 Forme : bouton, **grand**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 66  
 Insert endo n° 66A


1.000.5825  
 1.006.1992

## Insert SONICflex endo n° 67 / 67A

Traitement : Extension de grands canaux  
 Forme : cônica **125°**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 67  
 Insert endo n° 67A

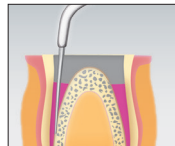

1.000.5822  
 1.006.1994

## Insert SONICflex endo n° 68 / 68A

Traitement : Extension de grands canaux  
 Forme : cônica **112°**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 68  
 Insert endo n° 68A

1.000.5823  
 1.006.1996

Informations importantes concernant  
 le numéro de référence:


**XX:** Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
**XXA:** Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex endo n° 69 / 69A

Traitement : Élimination des résidus de remplissage du canal radicaire  
 Forme : bouton, **petit**, diamantation D46



N° de référence : Insert endo n° 69  
 Insert endo n° 69A

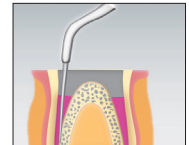


1.000.5827  
 1.006.1998

## Insert SONICflex endo n° 70 / 70A

Traitement : pour canaux particulièrement longs et larges  
 Forme : cônica **117°**, diamantation D25 la partie avant n'est pas diamantée



N° de référence : Insert endo n° 70  
 Insert endo n° 70A

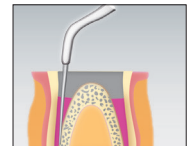

1.000.5821  
 1.006.2000

## Insert SONICflex Endo clean n° 96 / 96A

Traitement : pour le rinçage du canal radicaire, l'élimination des débris et de la boue dentinaire (smear layer) et potentialisation de l'action de la solution de rinçage antibactérienne.  
 Forme : angles de 105° et de 75°

N° de référence :  
 1X support N° 96 / 96A et 6X endo clean seringues 015, 020 et 025 :




Set: 1.006.2045 | Set A: 1.007.1142

Endo clean support no. 96 :

1.008.5163 | A: 1.008.5164

Endo clean seringues (6pcs) pour tous les SONICflex :

015 white: 1.006.2042 | 020 yellow: 1.006.2043 | 025 red: 1.006.2044

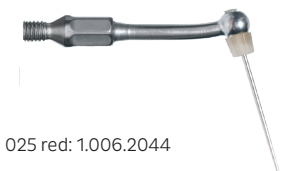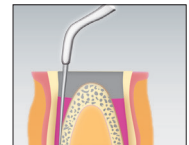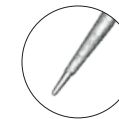


**Informations importantes concernant le numéro de référence:**

**XX:** Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
**XXA:** Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Insert SONICflex crown extension 020 n° 90 / 90A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :  
 tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique  
 Forme : petit, droit, surface extérieure diamantée (D46)

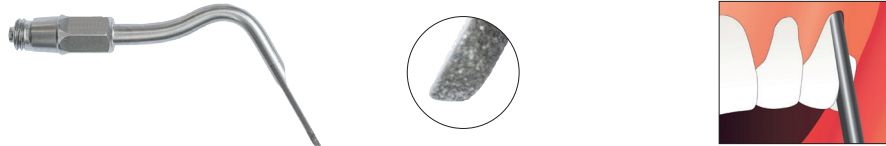


N° de référence : Insert crown extension 020 n° 90  
 Insert crown extension 020 n° 90A

1.011.3001  
 1.011.3002

## Insert SONICflex crown extension 020 n° 92 / 92A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :  
 tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique  
 Forme : petit, oblique, surface extérieure diamantée (D46)

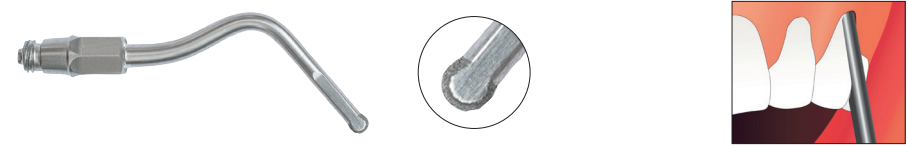


N° de référence : Insert crown extension 020 n° 92  
 Insert crown extension 020 n° 92A

1.011.3005  
 1.011.3006

## Insert SONICflex crown extension 020 n° 91 / 91A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :  
 tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique  
 Forme : small, oblique, diamond-coated outer surface D46

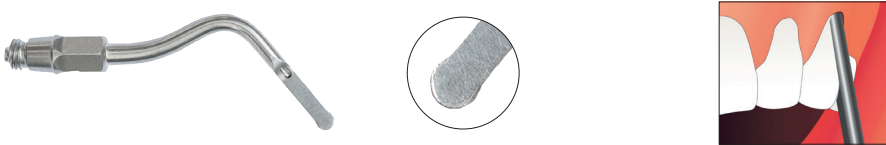


N° de référence : Insert crown extension 020 n° 91  
 Insert crown extension 020 n° 91A

1.011.3003  
 1.011.3004

## Insert SONICflex crown extension 030 n° 93 / 93A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :  
 tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique  
 Forme : grand, droit, surface extérieure diamantée (D46)

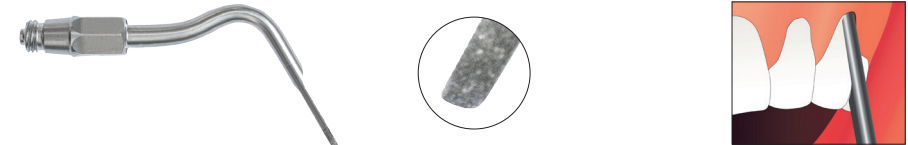

N° de référence : Insert crown extension 030 n° 93  
 Insert crown extension 030 n° 93A


1.011.3007  
 1.011.3008

# CHIRURGIE

## Insert SONICflex crown extension 030 n° 94 / 94A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

Forme : tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique grand, oblique, surface extérieure diamantée (D46)

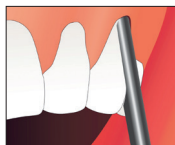

N° de référence : Insert crown extension 030 n° 94  
Insert crown extension 030 n° 94A

1.011.3009  
1.011.3010

## Insert SONICflex crown extension 030 n° 95 / 95A

Traitement : Élongation coronaire chirurgicale sans lambeau pour la restauration de l'espace biologique en cas de :

Forme : tracé d'arcade asymétrique, Sourire gingival, Atteinte de l'espace biologique petit, oblique, surface extérieure diamantée (D46)



N° de référence : Insert crown extension 030 n° 95  
Insert crown extension 030 n° 95A

1.011.3011  
1.011.3012

Informations importantes concernant  
le numéro de référence:

XX: Insert pour SONICflex 2003/2000 (filetage long)  
XXA: Insert pour SONICflex 2008 (filetage court)

## Accessoires :



clé dynamométrique

1.000.4887



Cassette stérile

0.411.9101



clé

0.411.0892



pièce intermédiaire pour l'alimentation de liquide  
médicamenteux pour SONICflex 2003 / 2008

1.000.6296  
A: 1.006.5966





# L'excellence dentaire dans tous les domaines.



## Équipements de cabinet dentaire

Unités de soin et scialytiques KaVo, fauteuils dentaires, systèmes de communication avec les patients, microscope dentaire, et autres instruments.



## Instruments

Pièces-à-main et contre-angles dentaires, turbines, systèmes d'aéropolissage et petits appareils pour tous les domaines d'application, notamment le diagnostic, la prophylaxie, les soins de restauration, la chirurgie, l'endodontie et l'entretien des instruments.



## Imagerie

Équipements de radiographies intraorales, capteurs et systèmes de plaques d'imagerie numérique, dispositifs de radiographie panoramique et céphalométrique combinés au CBCT, ainsi que des appareils dédiés au CBCT pour toute application dans le domaine des soins dentaires.

Les produits, fonctionnalités et services indiqués et décrits dans ce catalogue ne sont pas commercialisés dans tous les pays. Toutes les caractéristiques étaient exactes au moment de la publication. KaVo Dental GmbH n'est pas responsable des différences de couleur ou de forme par rapport aux illustrations, et n'est pas responsable des fautes ou des erreurs d'impression. KaVo Dental GmbH se réserve le droit de modifier les brochures à tout moment. La réimpression, même partielle, n'est autorisée qu'avec le consentement de KaVo Dental GmbH.

Dispositif Medical (DM) Classe IIa pour soins dentaires, réservé aux professionnels de santé, non remboursé par la Sécurité Sociale. Lisez attentivement les instructions figurant sur la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. L'ensemble des produits présent sur ce document sont fabriqués par les sociétés Kaltenbach & Voigt GmbH – Organisme notifié: 0124 – Date de parution mai 2018.