



BLACK LINE WORLD

TECHNIK UND LEISTUNG ERLEBEN

WUSSTEN SIE, DASS **BLACK LINE** **NICHT NUR** CHIRURGISCHE INSTRUMENTE ANBIETET?

Restaurative, diagnostische und endodontische Instrumente erweitern die Black Line Collection.

Aufgrund der erfolgreichen Einführung der Surgical Black Line Collection vor mehr als 6 Jahren und der kürzlichen Erweiterung dieser Produktpalette durch Instrumente mit Aluminium-Titan-Nitrid-Beschichtung kommt bei dem Namen Black Line zuerst diese Produktkategorie in den Sinn.

Das ist großartig, denn es zeigt, dass die Eigenschaften und Vorteile dieser Serie für Instrumente verschiedenster chirurgischer Eingriffe von den Ärzten gut wahrgenommen, anerkannt und geschätzt werden.

Vielleicht wissen Sie aber noch nicht, dass Sie von den großartigen Eigenschaften außerdem bei einer Vielzahl von anderen Handinstrumenten verschiedener Produktlinien profitieren können: Auch für Restaurations-, Diagnostik- und Endodontie-Linien gibt es schwarz beschichtete Instrumente. Das neue Instrument Calibra als Ergänzung des WeRestore-Kits oder Dr. Ferraris Kit sind großartige Beispiele für Restaurations-Instrumente, nicht zu vergessen die XTS Line, die noch vor der Surgical Black Line auf den Markt kam und dank ihrer außergewöhnlichen Antihafteigenschaften eine exakte Platzierung von Materialien ermöglicht.

Die schwarzen Kofferdamklammern, Stopfer, Spreizer, Exkavatoren und Sonden sind dagegen Beispiele für die Anwendung der Black Line-Technologie für endodontische Instrumente, während der kürzlich eingeführte hochauflösende schwarze Spiegel und Spiegelgriff als Neuzugänge die Diagnostik-Instrumente ergänzen. Es ist an der Zeit, dass Sie mehr über die Komplettlösungen der Black Line erfahren, damit Sie mehr leisten und komfortabler arbeiten können.

WEITER IN UNSERER RUBRIK
MONTAGSGESPRÄCHE.



SCHAUEN SIE UNSER VIDEO AN
UND ENTDECKEN SIE UNSERE
SCHWARZE PRODUKTPALETTE

ENDODONTIE

Endodontische Eingriffe erfordern besonderes Feingefühl und stellen höchste Ansprüche an Ergonomie, Integrität und Langlebigkeit der Instrumente für eine Vielzahl endodontischer Eingriffe - von der routinemäßigen Behandlung von Wurzelkanälen bis zu komplexen mikrochirurgischen Eingriffen.

DIAGNOSTIK

Der HD Black Mirror ist das Sahnehäubchen der jetzt noch umfangreicheren Black Line. Wir wollten den Spiegel unbedingt in unsere Black Line aufnehmen, da Ärzte ihn dank seiner Vielseitigkeit in einer Vielzahl von klinischen Einsatzgebieten integrieren können.

CHIRURGIE

Optimierung der klinischen Ergebnisse durch Effizienz bei einer Vielzahl chirurgischer Eingriffe. Dies ist das Ziel der Black-Line-Technologie für chirurgische Instrumente. Optimale Standzeit, reduzierte Spiegelung durch die mattschwarze Oberfläche sowie besserer Kontrast und bessere Sicht an der Operationsstelle und im darunter liegenden Gewebe stellen einen Mehrwert für chirurgische Behandlungen dar.

RESTAURATION

Die Aluminium-Titan-Nitrid-Beschichtung (AlTiN) auf Instrumenten für die Zahnrestauration ergibt eine extrem harte, glatte Oberfläche, die weder verkratzt noch klebt.

Der große, leichte Griff erleichtert die Reinigung und bietet gleichzeitig ein Optimum an Komfort und Kontrolle.

MERKMALE UND VORTEILE DER BLACK LINE:


- Optimale Standzeit und erhöhte Gleitfähigkeit.
- Höherer Kontrast und bessere Sicht an der Operationsstelle und im darunter liegenden Gewebe.
- Reduzierte Spiegelung.
- Maximaler Komfort, geringere Ermüdung der Hand und bessere Kontrolle.
- Optimale Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.

RESTORATIVE LINE


Rekonstruktion **WIE SIE SIE NOCH NIE ERLEBT HABEN**



**KOSTENLOSER
DOWNLOAD
DR. FERRARIS KIT**
BROSCHÜRE

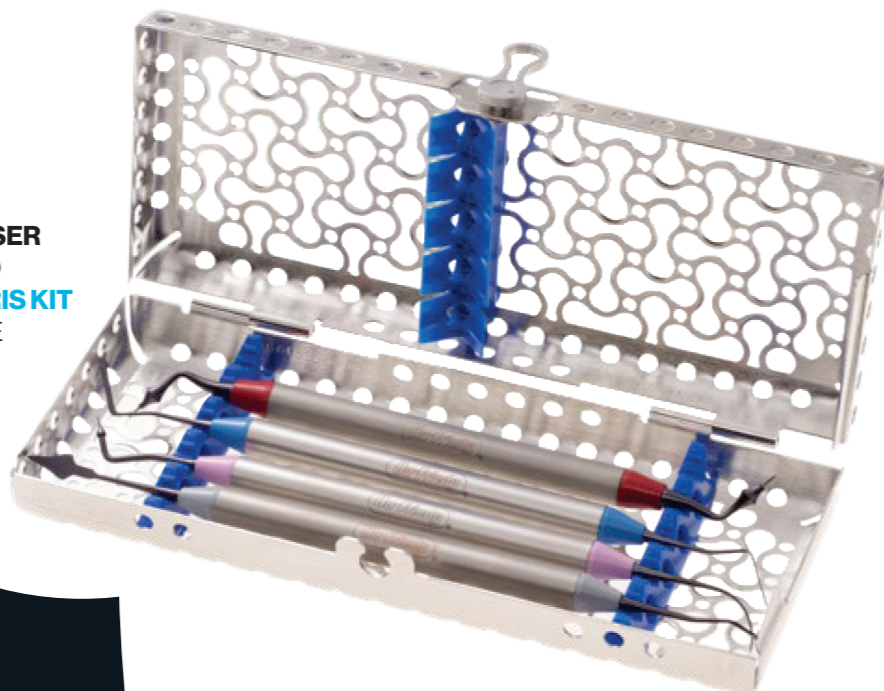

**KOSTENLOSER
DOWNLOAD
WERESTORE.IT**
BROSCHÜRE

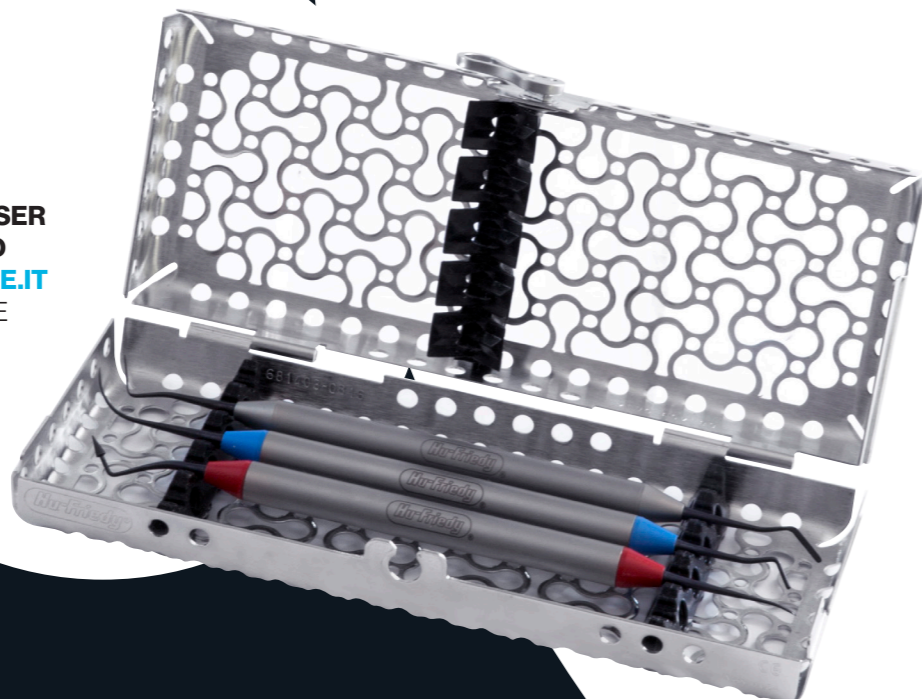





FEDERICO FERRARIS

ADHESSTHETICS THECA KIT VON HU-FRIEDY

Das Adhesthetic Theca Kit besteht aus vier einzigartigen Instrumenten, die von Dr. Federico Ferraris in Zusammenarbeit mit Hu-Friedy entwickelt wurden. Es handelt sich um einen unabhängigen Instrumentensatz, der die wichtigsten klinischen Phasen der direkten und indirekten restaurativen Zahnheilkunde abdeckt, und den Zahnärzten hilft, vorhersagbare Ergebnisse und klinische Spitzenleistungen zu erzielen. Das Haupt-Modellierinstrument, das Fein-Modellierinstrument, 3D-Modellierinstrument und das Direkt-Parodontometer wurden alle mit der XTS-Technologie hergestellt, die dunkle Beschichtung aus Aluminium-Titan-Nitrid (AlTiN) bietet einen hervorragenden Kontrast im Vergleich zu Kompositmaterialien und Zahnhartsubstanz. Die Beschichtung erzeugt eine extrem glatte Oberfläche und verhindert die Anhaftung von klebrigen Kompositmaterialien. Der glatte Handgriff ist ergonomisch und leicht. Jedes Instrument hat darüber hinaus ein eigenes Set farbiger Koni, um die Instrumentenidentifizierung zu vereinfachen. Neben den vier Instrumenten besteht das Set aus einer IMS™-Kassette, die die Instrumente vor Beschädigungen beim Transport und während der Reinigungs- und Sterilisationsprozesse schützt.

**SCHAUEN SIE UNSERE VIDEOS AN
DR. FERRARIS KIT**

-  3D-Modellierinstrument
-  Fein-Modellierinstrument
-  Haupt-Modellierinstrument
-  Direkt-Parodontometer

 adhesthetic

www.federicoferraris.com



BESSERE ARBEIT ALS BISHER

“Die Einbindung dieser Techniken in die täglichen Abläufe ermöglicht vorhersagbare Ergebnisse in der direkten und indirekten restaurativen Zahnheilkunde. Sich ständig selbst herausfordern und sich kontinuierlich verbessern ist das persönliche Motto von **Federico Ferraris.**”

DR. GAETANO PAOLONE UND DR. SALVATORE SCOLAVINO

HU-FRIEDY 3SSENTIAL KIT VON WERESTORE.IT

Das Hu-Friedy 3SSENTIAL KIT von Werestore.it ist ein unkompliziertes Restauraions-Kit, das gleich 3 wesentliche Instrumente enthält: Anterior- sowie Posterior-Instrumente und einen Spatel aus der Hu-Friedy Black Line Collection. Die drei Instrumente sind synergetisch und austauschbar; das Wort „Essential“ bezieht sich auf die Einfachheit aller restaurativen Verfahren bei Verwendung dieses Kits für alle wesentlichen Schritte zur Herstellung hochästhetischer Kompositrestaurationen. Das revolutionäre Konzept „Plug&Sculpt“ des Posterior-Instruments ist sehr einfach: Das eine Arbeitsende dient dazu, das Komposit in die Kavität zu stopfen, während mit dem anderen Arbeitsende das Kompositmaterial sowohl beim additiven als auch subtraktiven Modellieren ausgeformt werden kann. Mit dem Anterior-Instrument hingegen – von den Ärzten auch als „massiver Pinsel“ bezeichnet, kann das Komposit sehr leicht modelliert und verteilt werden.



**SCHAUEN SIE UNSER VIDEO AN
UND ERFAHREN SIE MEHR
ÜBER WERESTORE.IT**

WeRestore .it



Instrumente in
Zusammenarbeit mit
**Dr. Gaetano Paolone
und Dr. Salvatore
Scolavino**, Opinion
Leader Hu-Friedy.

RESTORATIVE LINE

CALIBRA™ KOMPOSITINSTRUMENT

FÜR CALIBRATED-RESTAURATIONEN

Das Calibra™-Kompositinstrument ist ein mit **XTS (AITiN)** beschichtetes Instrument, erleichtert die Ausformung der Dentinschicht mit der richtigen anatomischen Adaptation bei der Restauration und hält genau den richtigen Platz für die abschließende Zahnschmelzschicht frei. Die **Calibra™-Kompositinstrument „IN“-Spitze** wird zur Definition des Dentinkerns verwendet; die **Calibra™-Kompositinstrument „OUT“-Spitze** dagegen verringert die Gefahr, dass **überschüssiges Kompositmaterial** während der letzten Restaurationsschicht austritt. Das Calibra™-Kompositinstrument fungiert als **Führung** und hilft dabei, eine Überkonturierung am Präparationsrand sowie eine übermäßige Kompositdicke zu vermeiden und unterstützt die **Modellierung** der letzten Schicht des Kompositmaterials.

* Daten archiviert und auf Anfrage erhältlich.

CALIBRA™ MIT
„OUT“-SPITZE

CALIBRA™ MIT
„IN“-SPITZE



KOL CORNER

Instrumente in
Zusammenarbeit mit
Dr. Gaetano Paolone
und **Dr. Salvatore**
Scolavino, Opinion
Leader Hu-Friedy.

CALIBRA™ KOMPOSITINSTRUMENT

EINSATZ VON CALIBRA™ MIT „IN“-SPITZE



EINSATZ DER CALIBRA™ „OUT“-SPITZE



Das Calibra™-Kompositinstrument hat zwei Enden: Die „IN“-Spitze definiert den Dentinkern. Die „OUT“-Spitze ermöglicht es, Dicke und Form der letzten Schicht ohne Restmaterial zu überprüfen. Dieses Instrument ist eine Messlehre zur Überprüfung der Dicke (eine praktische Alternative zum sagittalen Silikonindex) und ein Modellierwerkzeug für die letzte Schicht.

BREITE PALETTE VON XTS™ -KOMPOSITINSTRUMENTEN

UNVERWECHSELBARES SCHWARZES FINISH

Erhöhter Kontrast zwischen Instrument, Zahnhartsubstanz und Kompositmaterial. Die schwarze Beschichtung blättert weder ab noch verfärbt sie die Restauration.

EINZIGARTIGER, GLATTER, GROSSER, LEICHTER GRIFF

Leichte Reinigung, maximaler Komfort, geringere Ermüdung der Hand und bessere Kontrolle.

QUALITÄTSHANDWERK/ VERSCHIEDENE DESIGNS

Satin Steel XTS™-Instrumente sind in ihren Eigenschaften unübertroffen und bieten ein umfangreiches Design-Sortiment für alle Anforderungen der Komposit-Platzierung.

Dank moderner Technologie und innovativem Design kann Hu-Friedy ein überlegenes Produkt anbieten: **XTS™-KOMPOSITINSTRUMENTE**. XTS™-Instrumente ermöglichen eine außergewöhnliche nicht haftende Platzierung von Kompositmaterialien ohne Verfärbung der Restauration.

Die Aluminium-Titan-Nitrid-Beschichtung (AITiN) erzeugt eine extrem harte, glatte Oberfläche, die Kratzern und Anhaftungen widersteht. Das Design des leichten Griffs mit großem Durchmesser erleichtert die Reinigung und bietet gleichzeitig optimalen Komfort und Kontrolle.



Die XTS™-Instrumente von Hu-Friedy sind hochwertige Optionen für jeden Schritt eines restaurativen Eingriffs. Die allgemeinen XTS™-Instrumente umfassen Schaber, Füllinstrumente, Konturierungsinstrumente, Stopfer, Polierer und Vieles mehr.



KOSTENLOSER DOWNLOAD
KOMPLETTE XTS™ LINE BROSCHÜRE



SCHAUEN SIE UNSER VIDEO AN
ENTDECKEN SIE DAS NEUE
CALIBRA™

ENDODONTIC LINE

DIE NÄCHSTE HERAUSFORDERUNG DER
ISOLIERUNG IST SCHWARZ

TIPP

Benötigen Sie Hilfe für ein
einfaches Kofferdamklammer-Kit?
Hier unsere Empfehlung
für die Auswahl:

RDCM00X - RDCM6X
RDCM9X - RDCM9SX
RDCM212X - RDCM212SAX



WELCHE VORTEILE HAT EINE SCHWARZE BESCHICHTUNG FÜR DIE ISOLIERUNG UND RESTAURATION?

Wie auch in unserer aktuellen Broschüre „Worried About Aerosol?“ beschrieben, bietet eine perfekte Isolierung einen trockenen, sauberen Arbeitsbereich, verbessert die Sicht und verringert das Risiko der Patientenaspiration. Deshalb könnte man kurz und knapp sagen, dass alles mit der Wahl der richtigen Kofferdamklammer, des weiteren Zubehörs und der richtigen Instrumente beginnt. Am Ende des Tages ist eine Kofferdamklammer auch nur eine Klammer ... oder doch nicht? Wir haben bereits auf die wichtigsten und wertvollsten Eigenschaften des Aluminium-Titan-Nitrids und seine Vorteile für die tägliche Praxis verwiesen, möglicherweise wissen Sie aber noch nicht, dass Sie von den Vorteilen der schwarzen Beschichtung jetzt auch bei Hu-Friedy-Klammern profitieren können, was für Ihre tägliche Praxis eine deutliche Verbesserung bedeutet. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass neben der dunklen Beschichtung, die den intraoralen Kontrast sowie die Sicht verbessert und durch die matte Oberfläche Spiegelung und Blendung reduziert, die Instrumente dank Satin Steel™ flexibel, korrosions- und formbeständig sind. Die Kombination dieser Eigenschaften stellt den wesentlichen Vorteil der Wahl einer Black-Line-Klammer dar.

BLACK LINE-KOFFERDAM-KLAMMERN

Hu-Friedy Kofferdam-Klammern werden in den USA aus patentrechtlich geschütztem Satin Steel hergestellt und zeichnen sich durch Korrosionsbeständigkeit, hervorragende Festigkeit und eine genaue Abstimmung von Flexibilität und Formbeständigkeit aus. Die mattschwarze Oberfläche aller 48 Modelle absorbiert und streut das Licht, statt es zu reflektieren, so dass Sie ein komfortables, augenschonendes Sichtfeld erhalten, das Ihnen Höchstleistungen ermöglicht.

PRODUKTARGUMENTE

- Reduzierte Spiegelungen und besserer Kontrast
- Verbesserte Sicht
- Korrosionsbeständig



BLACK LINE ENDO COLLECTION

Hu-Friedy bietet mit seinem umfassenden Sortiment an endodontischen Instrumenten und Zubehör viele Möglichkeiten, alle Ihre klinischen Anforderungen zu erfüllen. Wenn Sie außergewöhnliches Instrumentendesign, Qualität und Zuverlässigkeit sowie unübertroffenen Kundenservice suchen, treffen Sie mit den endodontischen Instrumenten von Hu-Friedy die richtige Wahl.



DIE HERAUSFORDERUNG

Endodontische Eingriffe erfordern besonderes Feingefühl und stellen daher höchste Ansprüche an Ergonomie, Integrität und Langlebigkeit der Instrumente für eine Vielzahl endodontischer Eingriffe - von der routinemäßigen Behandlung von Wurzelkanälen bis zu komplexen mikrochirurgischen Eingriffen.

DIE LÖSUNG

Hu-Friedy® Instrumente werden individuell nach präzisen Spezifikationen aus hochwertigen Materialien in Handarbeit gefertigt und zeichnen sich durch überlegene Eigenschaften, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Das Instrumentendesign ergibt in Verbindung mit eigenen Werkstoffen und hervorragender Verarbeitung Instrumente mit einzigartiger Balance, Arbeitshebelwirkung und Kontrolle. Sie fungieren als nahtlose Erweiterung der Fähigkeiten des Anwenders.

DAS ERGEBNIS

Die hochwertigen Hu-Friedy® Instrumente sind im klinischen Einsatz unübertroffen effizient, so dass der Behandler hervorragende Ergebnisse erzielen und sich auf den Patienten konzentrieren kann. Das Ergebnis ist eine hervorragende Patientenversorgung.



KOSTENLOSER DOWNLOAD
KOMPLETTE ENDO BLACK LINE
BROSCHÜRE

DIAGNOSTIC LINE

HD BLACK LINE MIRROR:
DAS GEHEIMNIS EINES
VIELSEITIGEN INSTRUMENTS



TIPPS & TRI-CKS DIGITAL:

„Ein ganz einfaches Problem der „digitalen Zahnmedizin“: bei intraoralen Scans im Seitenzahnbereich ist es oft notwendig, die Zunge zurückzuziehen. Leider ist unser üblicher Retraktor, der Dentalspiegel, durch seine metallisch reflektierende Rückseite dafür nicht ideal; der Scanvorgang kann deshalb unterbrochen oder verzerrt werden. Durch die Verwendung des neuen HD Black Line Mirror von Hu-Friedy habe ich die Probleme mit Spiegelungen definitiv gelöst.“

Dr. Carlo Poggio




HD Black Mirror zur Verbesserung der digitalen Aufnahme.

Zitat und klinisches Bild mit freundlicher Genehmigung von Dr. Carlo Poggio


OPTIMIEREN SIE IHRE AUSSTATTUNG MIT HD BLACK LINE-SPIEGELN

Die neuen HD-Black-Line-Spiegel von Hu-Friedy sind nicht nur für Untersuchungen geeignet. Vervollständigen Sie Ihren Instrumentensatz, egal wie er zusammengesetzt ist!

*HD Black Line-Spiegel sind separat erhältlich.

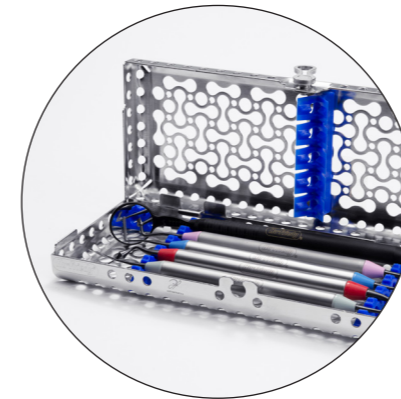

Restauration

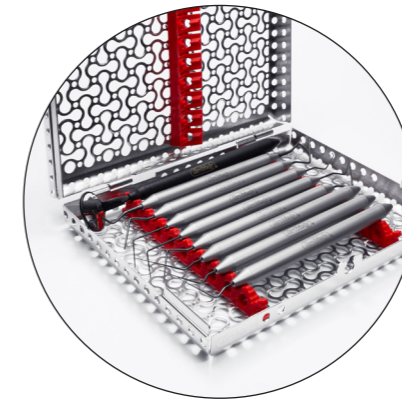

Endodontie



Chirurgie

REDUZIERT NACHWEISLICH **BLENDUNG** BIS ZU 80 %**

Sehen Sie Ihre Patienten - nicht Ihre Instrumente. Blendung beeinträchtigt die Sicht. Durch die Reduzierung dieser Sichtbehinderung können Sie mehr Details sehen und eine exaktere Patientenversorgung anbieten. HD Black Line-Spiegel wurden für optimale klinische Ergebnisse entwickelt, da sie bei jedem zahnärztlichen Eingriff eine hervorragende Sicht ermöglichen. Die geringere Blendung der Diamond Like Carbon (DLC)-Beschichtung und die Klarheit des HD-Spiegelglases ermöglichen eine schnellere und genauere Sicht im Mundinneren.

**Beim Vergleich des DLC-beschichteten Hu-Friedy-Spiegelkopfs und -Griffs mit dem nicht beschichteten Hu-Friedy-Spiegelkopf und -Griff aus Edelstahl.

HÖCHSTE BRILLANZ & FARBE

Der HD Black Line-Spiegel erlaubt durch bessere Brillanz und Farbe eine schnellere und genauere Sicht im Mund.

- 113 %[†] Reflexionsfaktor für außergewöhnliche Bildschärfe.
- 38,5 %^{††} heller als rhodinierte Mundspiegel.
- 50 %^{†††} heller als andere Front Surface Mundspiegel.

^{†††††}Daten archiviert und auf Anfrage erhältlich.

DIAMANTÄHNLICHE KOHLENSTOFFBESCHICHTUNG (DLC)

Die dauerhafte mattschwarze Beschichtung reduziert die Blendwirkung gegenüber einem Standard-Metallspiegelkopf und -griff. Dies verringert die Belastung und Ermüdung, da der Nutzer seine Betrachtungsposition nicht wegen unerwünschter Spiegelungen anpassen muss.

HÖHERER KONTRAST & BESSERE SICHT

Die schwarze Farbe der Beschichtung bewirkt einen deutlichen Kontrast zwischen dem Instrument, dem Zahn und/oder dem umgebenden Gewebe und ermöglicht so eine einfache intraorale Identifikation***.

***Beim Vergleich des DLC-beschichteten Hu-Friedy-Spiegelkopfs und -Griffs mit dem nicht beschichteten Hu-Friedy-Spiegelkopf und -Griff aus Edelstahl.

ERGONOMISCHER GRIFF


Der Griff mit dem großen Durchmesser verbessert die Kontrolle, bietet maximalen Komfort und reduziert die Ermüdung der Hand, so dass eine ergonomische Griffoption geschaffen wird.



SCHAUEN SIE UNSER VIDEO AN
BLACK MIRROR

SURGICAL LINE

SURGICAL BLACK LINE COLLECTION:
LEIDENSCHAFT FÜR **INNOVATION**

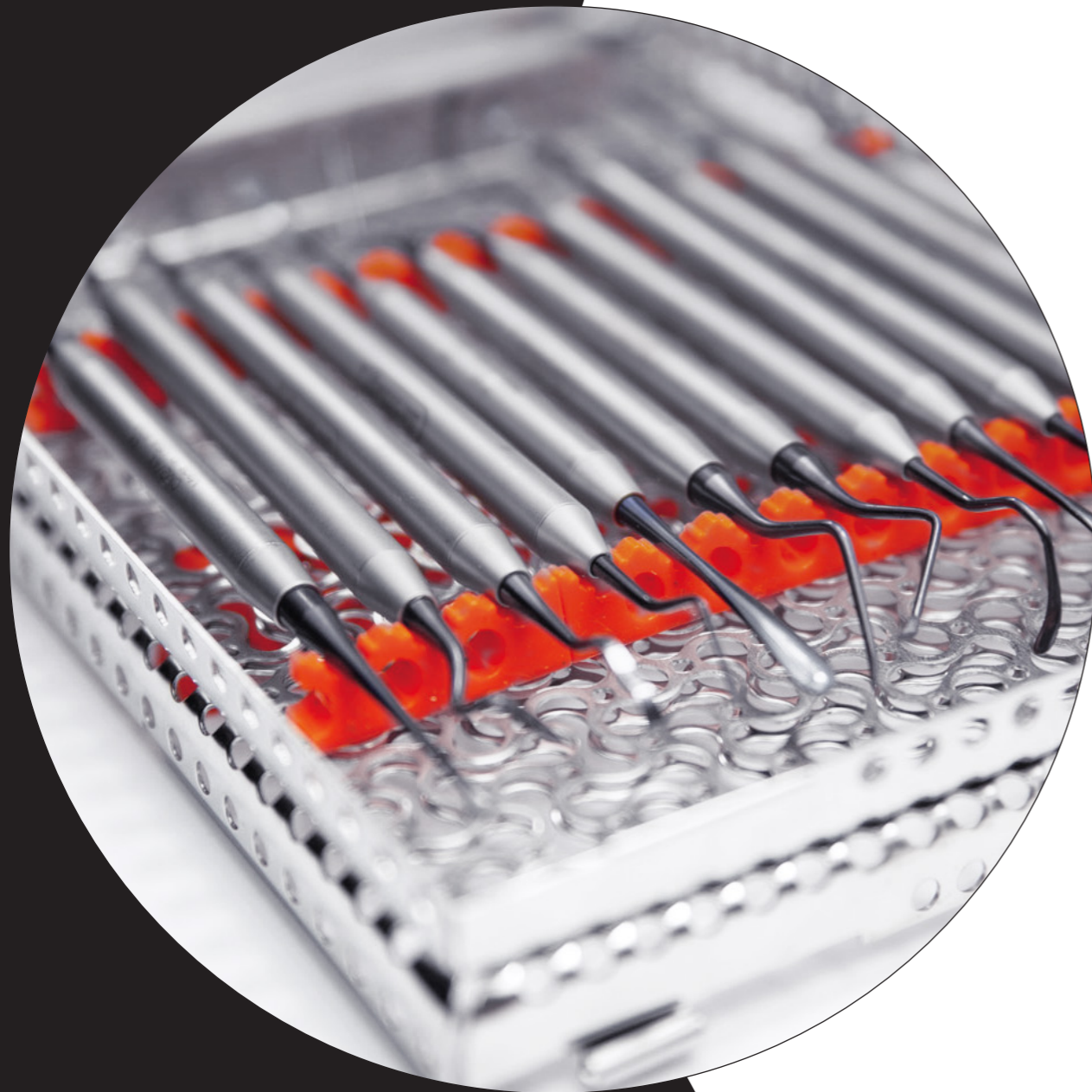

NEUE LÖSUNGEN FÜR IMMER ANSPRUCHSVOLLERE ANFORDERUNGEN

Die Hu-Friedy® Surgical Black Line unterstützt Ärzte jetzt durch Effizienz und Leistung in einem breiteren Spektrum klinischer Anwendungen. Die verschiedenen Instrumente aus Aluminium-Titannitrid dieser Kollektion ermöglichen dem Behandler dank ihrer spezifischen Eigenschaften Eingriffe in der Implantat- und Parodontalchirurgie, Mikrochirurgie, atraumatische Extraktionen sowie Tunneltechniken mit höherem Komfort und höherer Effizienz.

Nach der ersten Markteinführung haben wir neue Instrumente mit der gleichen leistungsfähigen Beschichtung ergänzt, um den Spezialisten einen größeren Vorteil zu verschaffen und ihre Arbeit zu erleichtern.

„Viele unserer Stammkunden fragten nach der Möglichkeit, die Produktpalette der Surgical Black Line zu erweitern“ - so Francesco Merletti, EMEA Instruments Product Manager - „das zeigt eindeutig, dass das Black Line-Konzept von unseren Nutzern als erfolgreich und vorteilhaft betrachtet wird. Wir sind froh und stolz, dass die Familie wächst.“

Das ursprüngliche Portfolio umfasste eine Auswahl an Raspatorien, Parodontalmessern, Periotomen, Luxationselevatoren, chirurgischen Küretten, Knochenmeißeln, Sinusliftinstrumenten und Super-Cut-Scheren; es wurde nun um weitere Kategorien wie Luxationshybride, Syndesmotome und Retraktoren mit schwarzer Beschichtung erweitert.

In der Spezialbroschüre finden Sie alle Details und Informationen, um sich mit der Black Line vertraut zu machen oder diese besser kennenzulernen, falls Sie bereits davon gehört und die Eigenschaften der Black Line kennen gelernt haben.

JETZT KOMPLETTE SURGICAL BLACK LINE SERIE

IMPLANTAT-OPERATIONEN




ATRAUMATISCHE EXTRAKTIONEN



GRÖßERES
**SORTIMENT AN
CHIRURGISCHEN
INSTRUMENTEN** -
**GRÖßERE AUSWAHL
FÜR CHIRURGISCHE
EINGRIFFE.**

PARODONTALE OPERATIONEN

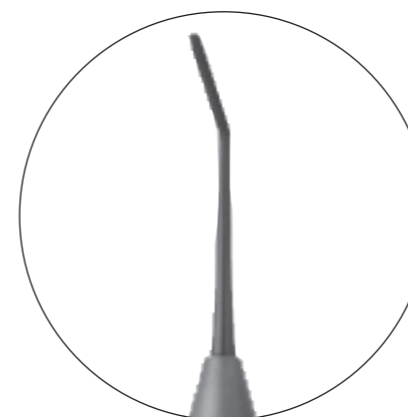

MIKROOPERATIONEN



TUNNELTECHNIK



KOSTENLOSER DOWNLOAD
KOMPLETTE SURGICAL BLACK LINE
BROSCHÜRE

SURGICAL LINE

IMMER IM DIENSTE DER
EXZELLENZ



SCHAUEN SIE UNSER
VIDEO AN
„INTERVIEW VON DR.
ISABELLA ROCCHIETTA“



WAS SAGEN UNSERE OPINION LEADER?

Hu-Friedy ist begeistert und stolz darauf, wie sehr die Qualität, Eigenschaften und klinischen Vorteile der Black Line-Instrumente von Opinion Leadern der Branche geschätzt und anerkannt werden, die seit der Markteinführung gerne damit arbeiten und uns eine wertvolle Unterstützung bei der Vermittlung einer authentischen Wertbotschaft sind. „Ich liebe die Black Line Instrumente“ - so Dr. Istvan Urban, dessen berühmtes „Mini Me“ nun auch in der schwarzen Version erhältlich ist.



IMPLANTATCHIRURGIE Dr. Stavros Pelekanos

“ Lebensqualität wird erreicht, wenn Sie Ihre Fähigkeiten mit Ihren Zielen und Bemühungen in Einklang bringen. Die Auswahl der richtigen Instrumente ist immer eine gute Idee. Die Verwendung der Black-Line-Instrumente von Hu-Friedy geht ein Schritt weiter. ”



KNOCHENAUFBAU Dr. Istvan Urban

“ Ich liebe die Black Line-Instrumente. Neben ihrer perfekten Qualität sind sie auch supercool. ”



MIKROCHIRURGIE Dr. Rino Burkhardt

“ Die Black Line-Instrumente von SwissPerio sind die einzigen, die meine Erwartungen an die visuelle Wahrnehmung und Empfindung bei parodontalchirurgischen Eingriffen durch bessere Sicht und räumliche Orientierung sowie verbesserte Erkennung in der Parodontal- und Implantatchirurgie voll erfüllen. ”



PARODONTALCHIRURGIE Dr. Giulio Rasperini

“ Ich liebe es, mit den Black-Line-Instrumenten zu arbeiten! Ich mag das Design, die Präzision und die Balance in meiner Hand. Seit ich die Instrumente in meiner täglichen Praxis einsetze, ist die Arbeit durch die reduzierte Spiegelung viel flüssiger. Mir gefällt vor allem die bessere Sicht bei Verwendung dieser Instrumente während der Eingriffe mit der Tunneltechnik. ”



ATRAUMATISCHE EXTRAKTION Dr. Christian Makary

“ Die mattschwarzen, nicht reflektierenden Arbeitenden verbessern die Sicht und reduzieren Blendungen, so dass Operationen erleichtert werden. Black Line-Instrumente sind sehr effizient und gut durchdacht. Ihre spezielle Beschichtung erlaubt eine bessere Kontrolle und Präzision durch die verlängerte Standzeit und die bessere Gleitfähigkeit, so dass der Kieferchirurg bei jedem Eingriff ein 'neues Instrumentengefühl' hat. ”





Für weitere Informationen zu Hu-Friedy Produkten oder einer Bestellung rufen Sie uns bitte unter 00800 48 37 43 39 an oder besuchen Sie [Hu-Friedy.eu](https://www.hu-friedy.eu).

Weitere Informationen über Crosstex-Produkte erhalten Sie unter der Telefonnummer +39 05 24 52 74 53 oder unter [crosstex.com](https://www.crosstex.com)

Wegen weiterer Informationen zu Omnia-Produkten oder einer Bestellung rufen Sie bitte unter +39 05 24 52 74 53 an oder besuchen Sie [omniaspa.eu](https://www.omniaspa.eu).

Da einige der in diesem Katalog enthaltenen Produkte möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich sind, bitten wir Sie, die Verfügbarkeit des Produkts bei Ihrem örtlichen Vertragshändler zu überprüfen oder unseren Kundendienst unter der kostenlosen Rufnummer 00800 48 37 43 39 zu kontaktieren. Alle angegebenen Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer. Alle Firmen- und Produktnamen sind Warenzeichen der Hu-Friedy Mfg. Co. LLC, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, sofern nicht anders angegeben.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC Alle Rechte vorbehalten. HFL-559DE/0421